



Если возникнут вопросы:
sup@linkpet.ru

Или напишите нам в Telegram:
<https://t.me/linkpetsupbot>




Установите близкую связь
со своим питомцем

КАК ПРАВИЛЬНО ВЗЯТЬ МАЗОК У ВАШЕЙ СОБАКИ

Внимание! Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед взятием образца.




1. Не взаимодействуйте с другими животными во время процедуры.
2. Подождите 2 часа с момента последнего приема пищи.
3. Щенкам до 3-х месяцев необходимо промыть ротовую полость водой.

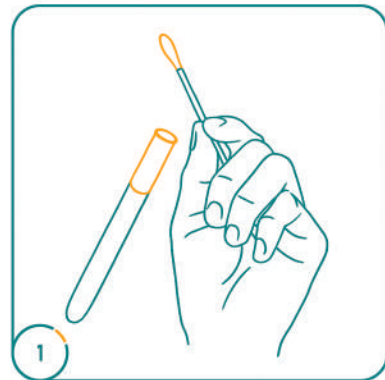

1. Достаньте ватную палочку из колбы, стараясь не прикасаться к ее верхней части.



2. Выбросьте колбу.

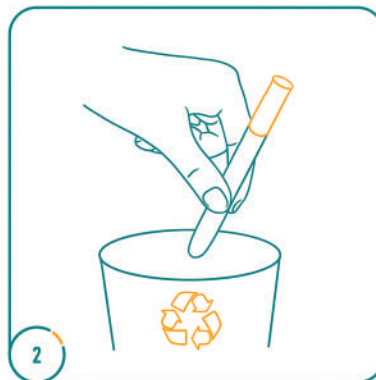

3. Вращайте палочку между щекой и деснами в течение **15 секунд**, осторожно надавливая.

Избегайте большого попадания слюны на палочку.


4. Просушите палочку, положив ее в любой стакан концом вверх на **5 минут**.

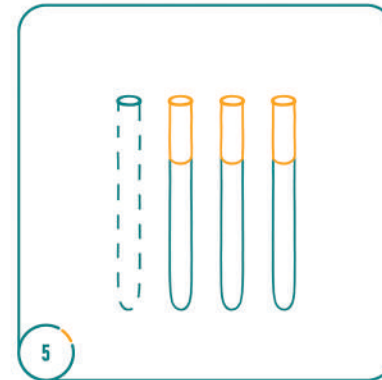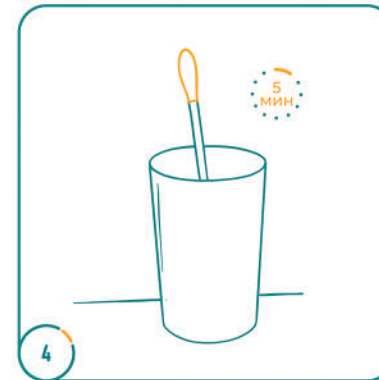

5. Повторите процедуру с остальными ватными палочками.


6. Перейдите на сайт по **QR-коду** или по ссылке, пока палочки сохнут.

<https://linkpet.ru/account/activate>

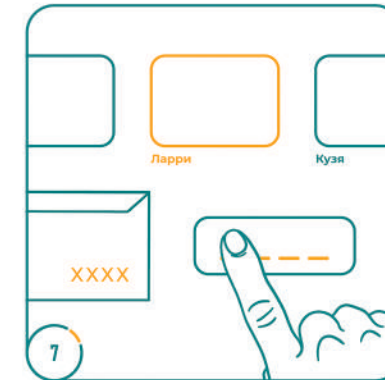

7. Выберите животное, у которого был взят мазок и введите код активации, указанный на конвертах.

8. После ввода кода оформите обратную доставку в личном кабинете Linkpet для исследования образцов.

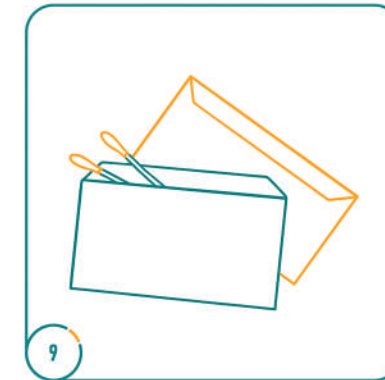

9. Сложите по две палочки в каждый конверт, заклейте их, положите обратно в коробку и ожидайте курьера.

10. Результаты исследования отобразятся в личном кабинете в карточке животного в течение 10 дней.

